



INSTRUCCIONES KIT RECOLECTOR DE SALIVA PARA RT-PCR

Diagnostika
Expertos en Diagnóstico Molecular

30
Minutos

INDICACIONES PREVIAS A LA TOMA DE MUESTRA

Evitar comer, beber, fumar, tomar chicles ó limpiar los dientes al menos 30 minutos antes de la recogida de la muestra. Los labios han de estar limpios de maquillaje o pintalabios.

No recoger muestras cuando hay enfermedades bucales, inflamación o lesiones (contaminación por sangre).

INSTRUCCIONES DE USO

Lavar las manos y desinfectar con gel hidroalcohólico antes de la manipulación de los componentes del kit.

En el momento de la obtención de la muestra, conviene practicar un ligero masaje en los carrillos, frotando estos contra los dientes con movimientos circulares, durante 30 segundos y pasar la lengua por el paladar varias veces con el fin de estimular la producción de saliva.

1

2

3

4

5

1

Una vez acumulada la saliva, abrir el tubo grande de tapón naranja y escupir en el interior hasta la mitad del cono aproximadamente



2

Abrir el tubo pequeño y verter el contenido en el tubo grande de tapón naranja sobre la saliva. Poner el tapón naranja bien enroscado y agitar con movimientos circulares hasta que ambos líquidos queden suficientemente mezclados. Y desechar el tubo pequeño.



3

Introducir el tubo grande en uno de los compartimentos del empapador blanco y enrollar alrededor del tubo todo el empapador.



4

Introducir el tubo enrollado en el empapador en la bolsa transparente, quitar el precinto del adhesivo y cerrar la bolsa.



5

Finalmente, introducir la bolsa en la caja y cerrar colocando la pegatina "SECURITY SEAL" en el frontal azul sobre la zona "Attach Security Seal Here".



+34 648 286 951



www.diagnostika.es

Expertos en Diagnóstico Molecular